

Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия:

Раствор увлажняющий офтальмологический Офтолик® в вариантах исполнения: Офтолик® Баланс и Офтолик® Ультра

Состав и описание медицинского изделия:

Описание: Раствор увлажняющий офтальмологический Офтолик® относится к группе «Смазывающие увлажняющие офтальмологические растворы, многодозовые, бесконсервантные». Данный продукт не содержит фосфатов.

Состав: Офтолик® Баланс: TS-полисахарид 0,2% (TSP); натрия гиалуронат (НА) 0,2%;

Офтолик® Ультра: TS-полисахарид 0,2% (TSP); натрия гиалуронат (НА) 0,4%.

Изделие изготовлено в соответствии с Нормативной документацией.

Область применения и назначение медицинского изделия:

Область применения: офтальмология

Назначение: Растворы увлажняющие офтальмологические Офтолик® Баланс и Офтолик® Ультра предназначены для увлажнения и смазывания глазной поверхности, для обеспечения комфорта и длительного облегчения при синдроме сухого глаза.

Информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия:

- Продукт предназначен только для наружного применения в офтальмологии.
- Не используйте, если флакон поврежден.
- Не следует использовать, если вы чувствительны к любому из компонентов.
- Не используйте после истечения срока годности, указанного на флаконе.
- Не касайтесь глаз наконечником флакона.
- Не глотать.
- После введения в редких случаях может наблюдаться небольшое временное затуманивание зрения из-за вязкости раствора; поэтому, перед началом какой-либо деятельности, требующей ясного видения, целесообразно подождать, пока вернется четкость зрительного восприятия.
- Необходимо подождать не менее 10-15 минут до применения каких-либо других офтальмологических препаратов.
- После вскрытия каждый флакон может использоваться до 90 дней.

- Осторожно закройте флакон после каждого использования, убедившись, что на наконечнике отсутствуют капли; если капли присутствуют, стряхните их.
- Во избежание риска сплющивания флакона не извлекать более 30 капель подряд.
- Раствор увлажняющий офтальмологический Офтолик® можно использовать при ношении контактных линз, поскольку оно не содержит в своем составе консерванты.
- Хранить в недоступном для детей месте
- Хранить при температуре не выше 25°C.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов, входящих в состав раствора.

Побочные действия: Аллергическая реакция. Возможно появление чувства склеивания век из-за вязкости раствора.

Информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия:

Раствор должен храниться при температуре не выше +25°C в недоступном для детей месте.

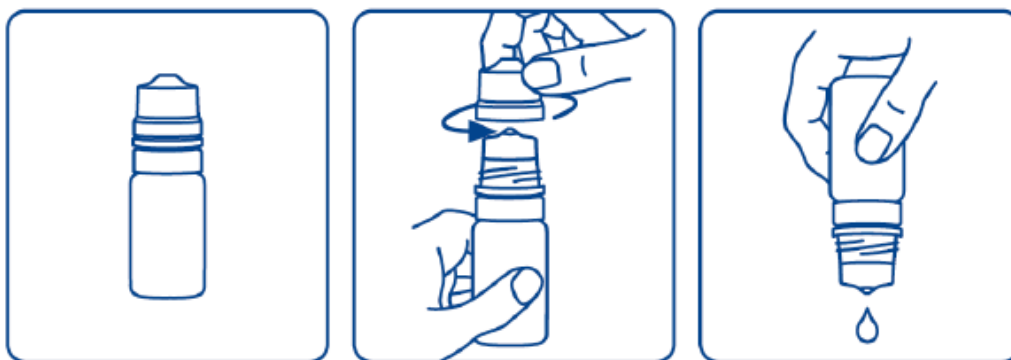
Срок годности- 24 месяца.

После вскрытия флакон можно использовать 90 дней.

Дополнительная информация, необходимая при использовании медицинского изделия:

Способ применения:

- 1) Откройте флакон;
- 2) Запрокиньте голову назад, чтобы глаза смотрели в потолок;
- 3) Указательным пальцем оттяните нижнее веко книзу, чтобы стал виден конъюнктивальный мешок;
- 4) Не касаясь кончиком флакона поверхности глаза и ресниц, выпустите каплю раствора прямо в конъюнктивальный мешок, образовавшийся при оттягивании нижнего века;
- 5) Постарайтесь держать глаз открытым в течение 30 секунд, если невозможно удерживать глаз открытым, то аккуратно поморгайте им, стараясь не допустить вытекания лекарственного раствора;
- 6) Закройте флакон.



Наименование, адрес и контактные данные производителя:

Фармиджеа С.п.А. (Farmigea S.p.A.)

г. Пиза, Виа Джован Баттиста Олива, 6/8, 56121, Италия (Pisa (PI) Via Giovan Battista Oliva, 6/8, 56121, Italy).

Тел: +39 050 31211,

Факс: +39 050 3121255,

Почта: info@farmigea.it

Наименование и контактные данные организации, принимающей претензии по медицинскому изделию от потребителей на территории Республики Казахстан:

ТОО «Sentiss Kazakhstan»

Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова 16, корпус №1, Бизнес центр «NGDEM», 5-й этаж, помещение №505/3






Тел: +7 (7272) 76-83-57,

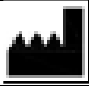
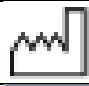


Почта: Sentiss_kz@sentisspharma.com

Данные о выпуске или последнем пересмотре инструкции по медицинскому применению:

XX.XX.XXXX

Расшифровка символов и обозначения, использованные при маркировке

	Код партии
	Использовать до
	Срок годности после вскрытия
	Обратитесь к инструкции по применению
	Температурный диапазон

	Изготовитель (производитель)
	Дата изготовления
	Стерилизация с применением методов асептической обработки
	Знак соответствия изделия основным требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского союза, цифры обозначают идентификационный номер уполномоченного органа, выдавшего знак